

Unsichtbar zu  
einem schönen Lachen

## Klebeprozess Attachments



1. Prüfen Sie vor dem Klebeprozess den Sitz der Attachmentschiene. Sollten in mehreren Quadranten Attachments geklebt werden, schneiden Sie die Attachmentschiene in Quadranten auf, so dass Sie den nachfolgenden Prozess für jeden Quadranten durchführen können.



2. Säubern Sie den ersten Quadranten und füllen Sie die Ausbuchtungen der Attachmentschiene mit einem lichthärtenden Kunststoff. Drücken Sie das Klebematerial akkurat in die vorhandenen Ausbuchtungen.



3. Trocknen Sie die Zähne und bestreichen Sie diese mit einem Primer. Setzen Sie die Schiene ein und drücken Sie diese überall an.



4. Härten Sie den Kunststoff nach Vorgabe des Herstellers komplett aus und entfernen Sie die Schiene. Danach starten Sie den Prozess (Position 2 bis 4) erneut für die anderen Quadranten.



**World Class Orthodontics**®

Ortho Organizers® GmbH

Lauenbühlstraße 59 · D-88161 Lindenberg  
Telefon: +49 8381 890950 · Fax: +49 8381 8909530  
E-Mail: [info@w-c-o.de](mailto:info@w-c-o.de) · Internet: [www.w-c-o.de](http://www.w-c-o.de)