

Unsichtbar zu sichtbar
schönen Zähnen

Handhabung & Pflege der Movendi[®] Schienen



Reinigen Sie Ihre Movendi[®] Schienen mit kaltem Wasser oder mit Zahncreme und Zahnbürste. Benutzen Sie auf keinen Fall heißes Wasser!



Bewahren Sie einfach während des Essens Ihre Movendi[®] Schienen in Ihrer Dose oder einem Glas Wasser auf.



Vermeiden Sie während des Behandlungszeitraums das Essen von zucker- oder säurehaltigen Produkten wie Limonaden oder Süßigkeiten.



Durch Hitze kann die Schiene verformt werden und verliert somit Ihre Wirkung. Bitte nehmen Sie deshalb keine heißen Getränke zu sich, solange Sie die Schiene im Mund tragen.



Durch Zigaretten, Kaffee, Tee, Rowein oder Ketchup können Verfärbungen an der Schiene auftreten. Ihre Behandlung wird hiervon nicht beeinflusst.



Bitte tragen Sie die Schiene mindestens 22h am Tag, außer zum Essen oder Zähneputzen. Nur so kann die Schiene optimal wirken.

Wichtiger Hinweis:

Bitte bewahren Sie alle Schienen bis zum Ende Ihrer Behandlung auf. Tragen Sie Ihre Schienen mindestens 22h am Tag und halten Sie die Wechselintervalle – wie mit Ihrer Praxis besprochen – korrekt ein.

Bei Nichteinhaltung können sich die Zähne in ihre alte Position zurückbewegen, Ihr Behandlungsergebnis ist gefährdet und Ihre Behandlungszeit verlängert sich.

Falls Sie eine Schiene verlieren oder diese beschädigt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Praxis und tragen Sie weiterhin die zuletzt getragene Schiene.

Am Ende der Movendi[®] Behandlung ist es notwendig die Zahnstellung zu stabilisieren (Retention). Hierfür geeignet sind Movendi[®] Retentionsschienen oder Retainerdrähte. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Praxisteam beraten.

Unsere Empfehlung:

Wir empfehlen allen Movendi[®] Patienten dringend, den Hinweisen genau zu folgen, so dass Ihr Wunsch nach einem „schönen Lächeln“ möglichst schnell in Erfüllung geht!

Ihr WCO Team wünscht Ihnen viel Erfolg!

 **World Class Orthodontics**[®]
Ortho Organizers[®] GmbH

Lauenbühlstraße 59 · D-88161 Lindenberg
Telefon: +49 8381 890950 · Fax: +49 8381 8909530
E-Mail: info@w-c-o.de · Internet: www.w-c-o.de